

Information für Zahnärztinnen und Zahnärzte:

Für die korrekte Anfertigung einer Apnoeclear-Schiene brauchen wir die folgenden digitalen Daten:

Von OK und UK einwandfreie Scans im «.stl» Datei-Format.

1. Scan der geschlossenen Kiefer in normaler Okklusion
2. Scan der Bisslage in Protrusions-Position

Hinweis: Bitte genügend Zahnfleisch-Regionen scannen. Ca. 5mm über die Zahnhälsa hinaus.

Konstruktions-Biss:

1. **Tipp:** OK und UK Modellsätze digital duplizieren (kopieren)
2. Konstruktions-Biss (Protrusions-Biss) Vorausgesetzt der Mundscanner ist dafür eingerichtet.

Hinweis:

Verwenden Sie bitte Ihre gewohnte Bissgabel zur Fixation der gewünschten Protrusion des Unterkiefers. Als Start-Lage empfehlen wir 50% der möglichen Maximal-Protrusion und ca. 5 mm Okklusions-Öffnung im Seitenzahnbereich.

Eventuell notwendige Korrekturen, können wir nachträglich mit unserem digitalen Artikulator durchführen. Die Kosten einer eventuellen Bisskorrektur für eine Folgeschiene, sind im Schienenpreis enthalten.

Fixieren Sie den Konstruktions-Biss nur punktuell im Molaren-Bereich mit der Bissmasse. Auf diese Weise bleiben die Seitenzähne und ein Teil der Frontzähne frei für den Konstruktions-Biss-Scan direkt im Mund.

Senden Sie uns folgende Scan-Daten via <https://wettransfer.com> :

- OK/UK-Scan im Normal-Biss
- OK/UK-Scan im Konstruktions-Biss

**Benutzen Sie bei Unklarheiten unseren Telefon-Support
+41 56 241 22 60**